



## ПАМЯТКА

### по забору образцов на генетические исследования КРС в лаборатории ООО «Мой Ген»

Для отбора образцов на генетические исследования в лаборатории ООО «Мой Ген» необходимо передать в лабораторию биологический материал для выделения ДНК. На исследование принимается следующий биологический материал:

- Кровь;
- Семенная жидкость;
- Кожные выщипы;
- Волосяные выщипы.

Наиболее предпочтительным является предоставление биологического материала в виде крови. Перед забором биологического материалы **необходимо заполнить стандартную форму направления**, которую можно запросить по телефону 89267100152 (Илья Рукин, научный сотрудник) или по почте [rukina@i-gene.ru](mailto:rukina@i-gene.ru).

**Важно! Ответственность за соответствие биологического материала маркировке в документах, бланках и на пробирках заказчик берет на себя.**

#### Условия забора и транспортировки крови.

Перед забором крови пробирки должны быть промаркированы в соответствии с направлением.

Для проведения тестирования достаточно 2 мл крови. Кровь необходимо забирать в **стандартные вакуумные пробирки с ЭДТА**. Наличие антикоагулянта (ЭДТА) обязательно!

Транспортировка образцов в лабораторию осуществляется заказчиком. В случае необходимости возможно заказать дополнительную услугу по организации доставки.

Образцы транспортируются при комнатной температуре в упаковке, гарантирующей целостность пробирок. Обязательным является приложение к пробиркам заполненного направления на тестирование.



#### Условия транспортировки семенной жидкости.

Семенная жидкость принимается в виде спермадоз, предпочтительно в виде промаркированных соломинок, в случае предоставления семенной жидкости в виде гранул, гранулы должны быть помещены в плотно закрытые пробирки. Пробирки должны быть промаркированы в соответствии с направлением. Доставка осуществляется при комнатной температуре.

#### Условия транспортировки кожных и волосяных выщипов.

Кожные выщипы должны быть подготовлены и предоставлены в соответствии с документом «Условия забора и транспортировки кожных выщипов». Волосяные выщипы собираются и упаковываются в соответствии с Бланком забора волосяных выщипов. Бланк забора волосяных выщипов и документ «Условия забора и транспортировки кожных выщипов» можно запросить по телефону 8 926 710 01 52 (Илья Рукин, научный сотрудник) или по почте [rukina@i-gene.ru](mailto:rukina@i-gene.ru).