



Условия забора и транспортировки КОЖНЫХ ВЫЩИПОВ.

Кожные выщипы получают с помощью биопсии кожного покрова (обычно в области уха). Площадь кожного выщипа составляет 0,2-1 см². Для получения кожных выщипов можно использовать хирургический скальпель, хирургические ножницы или щипцы для мечения выщипами.

Все работы, связанные с подготовкой к забору и забором кожных выщипов должен производиться в стерильных медицинских перчатках. Место забора на кожном покрове должно быть чистым, чтобы избежать контаминации.

Последовательность действий:

1. Пронумеровать пробирки объемом 1,7 мл (Eppendorf, Германия, пробирки предоставляются) в соответствии с направлением.
2. В каждую пронумерованную пробирку объемом 1,7 мл необходимо раскатать 1 мл 95% этилового спирта (ГОСТ Р 51723-2001).
3. Сразу после проведения биопсии, кожный выщип необходимо поместить в пробирку объемом 1,7 мл с 1 мл 95% этилового спирта.
4. Плотно закрыть пробирку объемом 1,7 мл.
5. Убрать пробирку объемом 1,7 мл в коробку для хранения пробирок (коробки предоставляются).

Каждый образец необходимо помещать в отдельную пробирку объемом 1,7 мл. Для каждого животного достаточно одного кожного выщипа, соответствующего ранее описанным требованиям по площади.

Важно! Ответственность за соответствие биологического материала маркировке на пробирке заказчик берет на себя.

Хранить и транспортировать кожные выщипы следует в плотно закрытых коробках с пробирками при комнатной температуре в темном месте. Со всеми вопросами и комментариями Вы можете обращаться в любое время по телефону 8 926 710 01 52 (Илья Рукин, научный сотрудник) или по почте rukini@i-gene.ru.