

Бланк забора волосяных выщипов для проведения генетических исследований в лаборатории ООО «Мой Ген»

Название предприятия:

Дата забора образца:

ФИО ответственного лица:

Номер телефона ответственного лица:

E-mail:


Линия сгиба

Область прикрепления волосяного выщипа

Кличка:

Инв. номер:

Дата рождения:

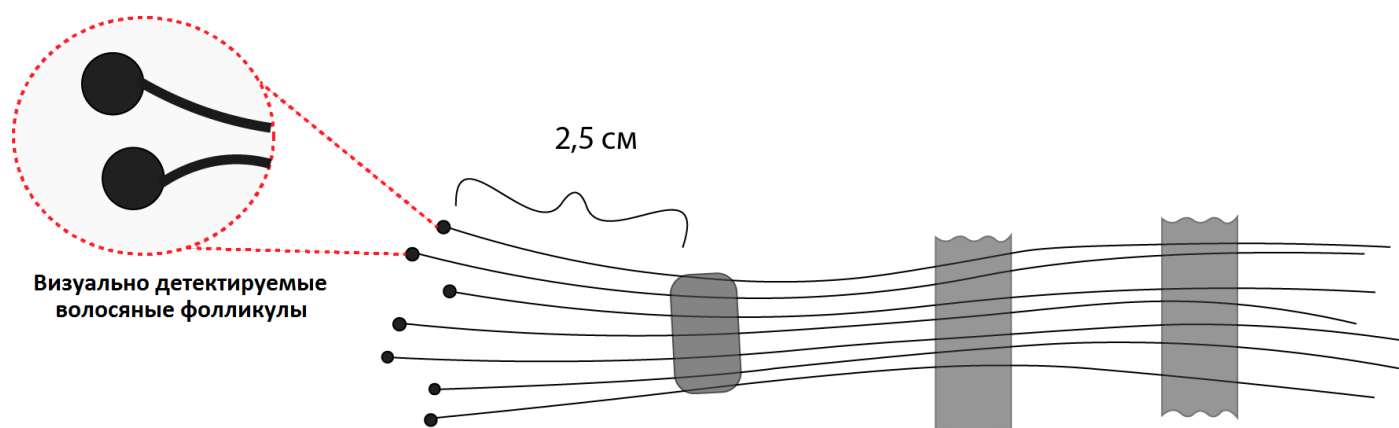

Линия сгиба

Важно! Ответственность за соответствие биологического материала маркировке в бланке заказчик берет на себя. Загрязненные волосы не принимаются к анализу.

Требования к забору волосяных выщипов:

- выщип необходимо производить в медицинских стерильных перчатках;
- заполните необходимую информацию о животном, от которого будет взят волосяной выщип;
- произведите выщип **не менее 40 волос** из средней части кисточки чистого и сухого хвоста животного с визуально детектируемыми волосяными фолликулами;
- расположите волосы так, чтобы все волосяные фолликулы смотрели в одну сторону и все волосы были собраны в один аккуратный пучок, до фолликул дотрагиваться нельзя;
- закрепите скотчем пучок волос по окружности пучка примерно на расстоянии 3 см от волосяных фолликул;
- прикрепите пучок волос к бланку скотчем в 2 местах так, чтобы избежать отклеивания пучка в процессе транспортировки (скотч не должен соприкасаться с волосяными фолликулами). Хвост волосяного пучка без волосяных фолликул, выступающий за пределы ширины листа направления, можно обрезать.
- сразу после прикрепления выщипа сложите бланк по линиям сгиба так, чтобы закрыть прикрепленный выщип краями бланка. Сложенный бланк немедленно уберите в конверт (формат А5) для отправки и запечатайте его, чтобы избежать смешивания образцов;
- чтобы избежать смешивания образцов, **каждый образец волосяных выщипов необходимо прикреплять на отдельный бланк, а бланк класть в отдельный конверт.**
- для каждого биологического образца должны быть заполнены следующие поля: кличка животного, инвентарный номер животного, дата рождения животного. **Образцы, в которых не заполнено хотя бы одно поле, в работу не принимаются.**