



## Условия забора и транспортировки образцов молока для выделения ДНК

### **Важно! Ответственность за соответствие биологического материала маркировке на пробирке заказчик берет на себя.**

Все работы, связанные с подготовкой к забору и забором молока, должны проводиться в стерильных медицинских перчатках. Вымя и сосок коровы должны быть чистыми во избежание контаминации образцов.

#### **Жидкие молочные продукты (цельное молоко, кефир и проч.)**

Перед забором жидких молочных продуктов пробирки должны быть промаркированы в соответствии с направлением.

Цельное молоко необходимо забирать в **стерильные пробирки с притёртой крышкой без консерванта**. Отсутствие консерванта обязательно! Для проведения тестирования достаточно 5 мл. цельного молока.

Транспортировка образцов в лабораторию осуществляется заказчиком. В случае необходимости возможно заказать дополнительную услугу по организации доставки.

Образцы транспортируются при температуре +4°C - +10°C, если доставка в день сбора, либо, в случае доставки продолжительностью более одного дня, пробирки с цельным молоком следует заморозить и транспортировать замороженными в упаковке, гарантирующей целостность пробирок.

Обязательным является приложение к пробиркам заполненного направления на тестирование.

По всем вопросам Вы можете обращаться по телефону 8(800) 777-87-40 (по будням, с 9<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup>) или по почте [zakaz@i-gene.ru](mailto:zakaz@i-gene.ru)